

FICHE PRODUIT

Wassenburg Medical B.V.
Industrieweg 11
NL-6662 PA Elst
PAYS-BAS
Tél. : +31 (0)488 700 500

info@wassenburgmedical.nl
www.wassenburgmedical.com

EndoHigh® Detergent

DETERGENT DESTINE AU NETTOYAGE AUTOMATIQUE ET MANUEL DES ENDOSCOPES FLEXIBLES DANS LES LAVEURS DESINFECTEURS D'ENDOSCOPES FLEXIBLES WASSENBURG® AINSI QUE DANS LES BAINS A IMMERSION ET LES BAINS A ULTRASON – LIQUIDE CONCENTRE

RÉFÉRENCE : MB 5238/1-7 (DR. WEIGERT)
VERSION : V7.00
DATE DE PUBLICATION : 03/2026

Principaux domaines d'application

Nettoyage des endoscopes flexibles et des accessoires d'endoscopie dans les laveurs désinfecteurs d'endoscopes WASSENBURG® WD440, WD415, WD440 PT et WD4200 ainsi que dans les bains à immersion et les bains à ultrasons.

Propriétés

EndoHigh® Detergent est un détergent légèrement alcalin destiné au retraitement des endoscopes flexibles. EndoHigh® Detergent élimine efficacement les résidus de sang séché et dénaturé tout en préservant efficacement les matériaux. Il permet de réduire significativement les résidus de matières organiques. EndoHigh® Detergent contient des alcalis, des enzymes et des agents de surface qui empêchent les résidus de protéines de se redéposer et réduisent également la tension de surface des solutions nettoyantes. L'aluminium anodisé doit être testé au préalable. EndoHigh® Detergent convient pour nettoyer les endoscopes de toutes les grandes marques.

Application et dosage

EndoHigh® Detergent s'utilise dans les laveurs désinfecteurs d'endoscopes flexibles WASSENBURG® WD440, WD415, WD440 PT et WD4200 ainsi que dans les bains à immersion et les bains à ultrasons. Il convient de respecter les paramètres suivants lors de l'utilisation d'EndoHigh® Detergent :

- Nettoyage automatique des endoscopes flexibles et des accessoires d'endoscopie dans les laveurs désinfecteurs d'endoscopes flexibles WASSENBURG® WD440, WD415, WD440 PT et WD4200 : 5 ml/l (0,5 %), 35 - 40 °C, 4 - 5 min. Pour l'étape de désinfection qui suit, il est recommandé d'utiliser les produits EndoHigh® GTA et EndoHigh® PAA.
- Nettoyage manuel des endoscopes flexibles et des accessoires d'endoscopie dans des bains à immersion et des bains à ultrasons : 5 – 30 ml/l (0,5 – 3 %), max. 40 °C, 5 – 10 min

La solution EndoHigh® Detergent doit être entièrement rincée. Afin d'éviter la formation de taches d'eau, il est recommandé d'utiliser de l'eau déionisée pour le rinçage final.

En cas d'application manuelle, la dose à utiliser peut varier en fonction du degré de salissure. En cas de lavage manuel, la solution de travail doit être changée au moins une fois par jour ou immédiatement si elle est visiblement sale. En cas de prélavage manuel et de lavage automatique il n'est pas nécessaire d'effectuer un rinçage manuel d'EndoHigh® Detergent car cette étape peut être réalisée dans le laveur désinfecteur.

Utiliser des dispositifs de dosage adaptés. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Rincer le système de dosage, y compris le flexible d'aspiration, à l'eau avant de changer le produit.

Le retraitement doit être conforme à toutes les exigences de la réglementation relative aux dispositifs médicaux et réalisé au moyen des processus validés adéquats. Veuillez respecter les consignes de retraitement fournies par les fabricants des dispositifs médicaux conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664. Il convient d'appliquer scrupuleusement les instructions fournies par le fabricant du laveur désinfecteur. Usage réservé exclusivement aux professionnels.

Caractéristiques techniques

Densité (à 20 °C) : env. 1,1 g/cm³

pH (mesuré dans de l'eau déionisée, à 20 °C) 5 – 30 ml/l : 10,7 – 10,8

Le pH peut varier dans l'eau du robinet, l'eau adoucie ou, par exemple, à cause de la présence d'eau de rinçage.

Viscosité (concentré, à 20 °C) : < 10 mPa s

Ingrédients

Ingrédients conformes au Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents :

- < 5 % d'agents de surface non ioniques et anioniques
- contient également des enzymes

Marquage CE

EndoHigh® Detergent est conforme aux directives européennes relatives aux dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec le produit, il faut le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

Informations relatives au stockage

Conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel. Maintenir à l'abri du soleil. Toujours conserver ce produit à une température comprise entre 0 et 25 °C. Utilisable dans les 2 ans s'il est stocké dans les conditions recommandées. La date limite d'utilisation du produit est imprimée sur l'étiquette, derrière le symbole représentant un sablier .

Mentions de danger et conseils de prudence

Pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, consulter la fiche de données de sécurité du produit. N'éliminer le récipient qu'après l'avoir entièrement vidé et refermé. Pour en savoir plus sur l'élimination des résidus de produit, consulter la fiche de données de sécurité.

Distribution

Distribué par : Wassenburg Medical B.V., Industrieweg 11, NL-6662 PA Elst, Pays-Bas,
Tél. : +31 (0)488 700 500, info@wassenburgmedical.nl, www.wassenburgmedical.com

Fabricant

Fabriqué par : Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85, 20539 Hambourg, Allemagne, Tél + 49 (0)40 7 89 60-0, Fax + 49 (0)40 7 89 60-120

Dans les informations ci-dessus, qui sont conformes à l'état de nos connaissances actuelles, nous décrivons les mesures de sécurité à appliquer avec notre produit, mais nous ne formulons aucune description de la qualité du produit ni aucune promesse concernant certaines de ses propriétés.