

ENDO FENDER®

3-fach Systemschutz: Distalschutz,
Ventilzuordnung und intensivere Desinfektion




EINE 3-in-1-LÖSUNG

Der von Wassenburg entwickelte EndoFender® Systemschutz bietet eine innovative und sichere Methode, um sowohl das distale Ende des Endoskops zu schützen, als auch die Ventile während des gesamten Aufbereitungsprozesses an dem dazugehörigen Endoskop zu verwahren. Darüber hinaus bleiben Ihre Originalventile während der gesamten Desinfektion geöffnet, wie in der KRINKO Richtlinie gefordert. Dadurch wird die Aufbereitung der Ventile optimiert und ihre nachfolgende Trocknung sichergestellt.

FUNKTIONSPRINZIP

Die drei Schritte des EndoFender® decken den gesamten Aufbereitungsprozess ab. Der grüne Schiebeschalter zeigt an, in welchem Schritt des Aufbereitungsprozesses sich das Endoskop befindet.

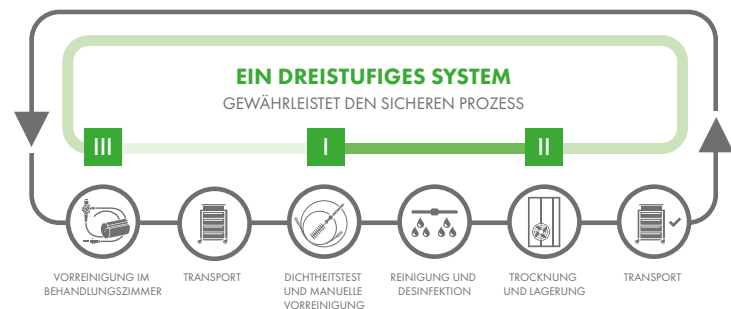

- I Der EndoFender® kommt direkt nach der manuellen Reinigung der Ventile zum Einsatz: Nachdem die Ventile mit der Bürste gereinigt wurden, werden sie in geöffnetem Zustand in den EndoFender® an die dafür vorgesehenen Stellen eingesetzt. Somit wird eine optimale Reinigung und Desinfektion im RDG-E ermöglicht.
- II Nach der Reinigung und Desinfektion im RDG-E wird das distale Ende in den EndoFender® platziert und dadurch geschützt. Die geöffneten Ventile verbleiben im EndoFender® und werden dort bis zur nächsten Untersuchung verwahrt.
- III Die verwendeten Ventile verbleiben im Endoskop. Das Endoskop wird in den Aufbereitungsraum gebracht.



ENDOFENDER®: SCHUTZ WÄHREND TRANSPORT UND LAGERUNG

Der EndoFender® Systemschutz schützt nicht nur das distale Ende sondern auch den Gummi des Einführschlauchs. Dadurch senken Sie ggf. hohe Reparaturkosten und steigern die Verfügbarkeit Ihrer Endoskope. Die Ventile werden in geöffnetem Zustand in die Halterungen des EndoFender® eingesetzt. Distale Endkappen können ebenfalls im EndoFender® aufbewahrt werden.



DER 3-FACH SYSTEMSCHUTZ FÜR IHRE FLEXIBLEN ENDOSKOP

- Schützt das distale Ende und den Gummi des Einführschlauchs während Trocknung, Lagerung und Transport.
- Verwahrt die Ventile als Set mit dem dazugehörigen Endoskop. Dies ermöglicht eine bessere Dokumentation und Rückverfolgbarkeit.
- Ventile bleiben während Reinigung und Desinfektion im RDG-E und während Trocknung und Lagerung stets geöffnet.

Der EndoFender® ist ein Einmalprodukt.

BESTELLINFORMATION

Artikelnr. 952468	EndoFender®	96 Stück
Artikelnr. 952723	EndoFender® Wandhalterung	01 Stück



KONFORMITÄT

Mit dem EndoFender® Systemschutz halten Sie die Richtlinien ein, nach denen die Ventile als Set mit dem dazugehörigen Endoskop aufbewahrt und in geöffnetem Zustand gereinigt werden sollen.

Kommission für Krankenhaushygiene und –prävention (KRINKO) Richtlinie 2012:

„Grundsätzlich müssen alle äußeren und inneren Oberflächen für Reiniger und Desinfektionsmittel zugänglich sein (Öffnen von Ventilen/ Hähnen, Gelenkinstrumenten, Vermeidung von Spülschatten, korrekte Konnektion von Hohlinstrumenten).(...)“

British Society of Gastroenterology

Abnehmbare Ventile (hauptsächlich Luft-/Wasser- und Ansaugventile/-kolben) müssen mit den dazugehörigen Endoskopen in einem RDG-E als Einzel-Set dekontaminiert werden, um die Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen.

HSE-Standards und empfohlene Verfahren für Endoskop-Aufbereitungsgeräte

Ventile, einschließlich der Spülventile und der abnehmbaren Teile, müssen mit dem Endoskop aufbewahrt werden und bilden ein Ausstattungs-Set.

European Society of Gastroenterology

Die Ventile und distalen Endkappen müssen separat, aber beim Endoskop aufbewahrt werden. Die Ventile (einschließlich der Spülventile) müssen mit einem zugeordneten Endoskop als Set aufbewahrt werden, da sie den Luftdurchfluss durch das Endoskop blockieren könnten. Somit werden Kreuzinfektionen vermieden und die vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet.

AAMI ST91 American National Standard

Abnehmbare Teile, die wiederverwendet werden sollen (z.B. Luft-/Wasser- und Ansaugventile/-kolben) müssen zusammen bearbeitet und mit dem spezifischen Endoskop als Einzel-Set aufbewahrt werden, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Society of Gastroenterology Nurses and Associates

Alle Standorte, an denen gastroenterologische Endoskopieverfahren durchgeführt werden, müssen über ein manuelles oder elektronisches System für die Rückverfolgung der Endoskope und des wiederverwendbaren Endoskopzubehörs vom Einsatz am Patienten über den gesamten Reinigungs- und Desinfektionsprozess hinweg verfügen. In der Literatur wird empfohlen, dass wiederverwendbare Klammern und Ventile aufbereitet und als Set zusammen mit dem Endoskop für Rückverfolgungszwecke gelagert werden.

Wassenburg Deutschland GmbH
Krefelder Str. 350
41066 MÖNCHENGLADBACH
DEUTSCHLAND
info@wassenburgmedical.de
www.wassenburgmedical.de



Wassenburg Medical ist ein Mitglied der Hoya Corporation und ein Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung innovativer Produkte und Leistungen für die Prozessoptimierung bei der Aufbereitung von Endoskopen.

Wir erweitern unser Unternehmens- und Produktportfolio kontinuierlich und verfügen über ein erfahrenes, internationales Vertriebsnetz. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

© Copyright 2018. Änderungen vorbehalten.

Verkauf Kundendienst

T: +49 (0)2161-94990-11

F: +49 (0)2161-94990-33

Technischer Kundendienst

T: +49 (0)2161-94990-10

Technische Hotline

T: +49 (0)2161-94990-04