

EndoHigh® PAA & EndoHigh® Detergent

Excellentes performances de processus





AVANTAGES PRODUIT



Wassenburg a conçu ses produits chimiques de processus autour d'une performance de nettoyage et d'une sécurité supérieures. Il en résulte des temps de cycle rapides, une diminution des coûts grâce à une maintenance réduite et un faible impact environnemental. Toutes les combinaisons de produits EndoHigh® sont développées exclusivement pour les laveurs désinfecteurs WASSENBURG® qui offrent d'excellentes performances de processus, sûrs à 100 %. EndoHigh® PAA est un désinfectant liquide de haut niveau à base d'acide peracétique, utilisé pour le traitement automatisé d'endoscopes flexibles.

ATTEINT RAPIDEMENT L'EFFICACITÉ

Le vaste spectre d'activité - y compris d'activité sporicide (C. difficile) - d'EndoHigh® PAA vous aide à offrir au patient une grande sécurité. Le spectre requis est couvert en à peine 5 minutes à 35 °C.

COMBINAISON DE PRODUITS ENDOHIGH®

EndoHigh® Detergent est parfaitement compatible avec EndoHigh® PAA. L'efficacité de nettoyage exceptionnelle d'EndoHigh® Detergent entraîne une étape de nettoyage courte, de 4 minutes seulement, pour un endoscope traité dans un équipement WASSENBURG®. EndoHigh® Detergent est un détergent fiable pour le nettoyage manuel et automatisé d'endoscopes flexibles dans des laveurs désinfecteurs WASSENBURG®, ainsi que dans des bains en immersion et à ultrasons.

USAGE UNIQUE

Avec ce désinfectant à usage unique, il n'est pas nécessaire d'utiliser un activateur ou de mélanger les ingrédients lors d'un cycle de processus, ce qui garantit un environnement sûr pour l'utilisateur.


ENDOHIGH® DETERGENT & ENDOHIGH® PAA

- Excellentes performances de nettoyage et de désinfection
- Temps de cycle court: un cycle de 22 minutes*
- Longue durée de vie de 15 mois
- Reconnaissance RFID
- Parfaitement compatible avec toutes les marques des principaux fabricants d'endoscopes

* Les temps de cycle exacts dépendent du modèle de machine, du programme sélectionné et de facteurs locaux tels que la température de l'eau. Pour plus d'informations sur EndoHigh® PAA et EndoHigh® Detergent, veuillez contacter votre fournisseur WASSENBURG® local.



PROCESSUS

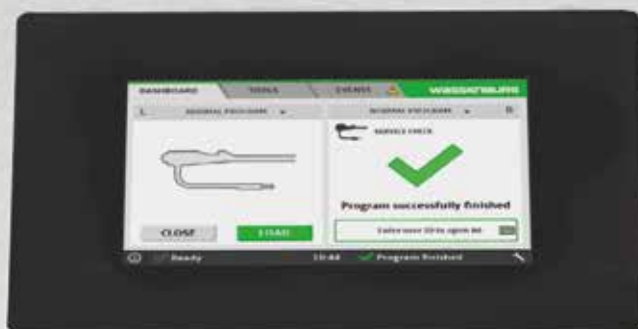


UN PROCESSUS RAPIDE

En raison des caractéristiques des produits chimiques EndoHigh®, des performances de processus rapides et 100 % sûres sont garanties. Les étapes du processus mises en surbrillance en vert dans le tableau correspondent aux essais de type réalisés.

AVANTAGES D'UN CYCLE RAPIDE (22 MINUTES)

- Augmentation de capacité de traitement
- Réduction du temps de rotation des endoscopes
- Faible consommation de ressources

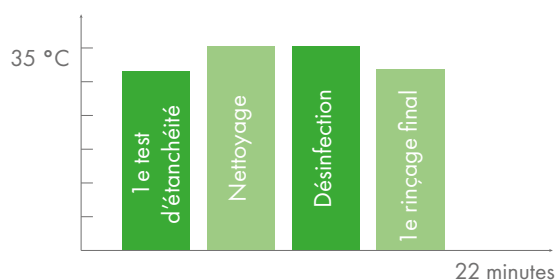

ACCORD PARFAIT

Il est scientifiquement prouvé qu'aucun rinçage intermédiaire n'est nécessaire : un éventuel transfert d'EndoHigh® Detergent à l'étape de nettoyage n'a aucun impact sur l'efficacité de la désinfection d'EndoHigh® PAA.

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Le réglage optimisé de la température entraîne une température de processus de 35 °C pendant le nettoyage et la désinfection. Cela permet de réduire le temps et l'énergie nécessaires pour atteindre la température de processus appropriée.

AUCUN DEUXIÈME RINÇAGE FINAL REQUIS

La quantité de résidus chimiques après un rinçage final s'est révélée efficace dans les limites mentionnées dans l'essai de type, ce qui signifie que l'endoscope est parfaitement rincé à un niveau sûr.

PROTECTION DU PROCESSUS GRÂCE À LA RFID

Tous les produits chimiques de processus EndoHigh® sont dotés de la reconnaissance RFID pour vous aider à protéger le processus. Un cycle ne démarre qu'avec la combinaison correcte de produits soumis à un essai de type. Le risque d'erreur humaine est minimisé car l'étiquette RFID apposée sur chaque bidon identifie et vérifie automatiquement les paramètres critiques, tels que la date de péremption, l'enregistrement du lot, la position correcte du bidon et le nombre de cycles par bidon.



TRAÇABILITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROCESSUS

Grâce à notre logiciel de traçabilité Process Manager, il est aisé d'enregistrer les données de processus à partir de l'étiquette RFID et de créer un précieux historique pouvant servir d'outil de gestion efficace, ainsi que de se conformer aux systèmes qualité en vigueur.



CONFORMITÉ

Les produits chimiques de processus utilisés dans le traitement d'endoscopes doivent être conçus, testés et fabriqués conformément à la Directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Comme le stipule la norme ISO 15883 parties 1 et 4, une série d'essais de type doivent être réalisés pour démontrer l'efficacité de la combinaison de produits sélectionnée et du laveur désinfecteur d'endoscopes.

TESTS IN VITRO

L'activité désinfectante est prouvée et confirmée selon la norme DIN EN 14885. EndoHigh® PAA a une activité bactéricide, fongicide, mycobactéricide, virucide et sporicide.

ESSAIS DE TYPE

Soumis à des essais de type selon la norme ISO 15883 parties 1 et 4

Les résultats des essais de type réalisés aux laboratoires de HygCen et de Biotech Germande sur le cycle complet sans prérinçage prouvent que les produits EndoHigh® en combinaison avec des laveurs désinfecteurs WASENBURG® sont parfaitement conformes à la norme ISO 15883 partie 4, clause 4.1.3.

D'après la moyenne globale des facteurs de réduction microbienne, tous les micro-organismes testés induits par la phase de désinfection sont conformes aux exigences de la norme ISO 15883 partie 4, clause 4.4.2.4.

Soumis à des essais de type selon la norme ISO 15883 partie 5

Le processus de traitement automatisé avec EndoHigh® Detergent et EndoHigh® PAA répond aux exigences de la norme ISO 15883 partie 5, annexe I, concernant la réduction microbiologique >9 log pour l'intégralité du processus.

L'efficacité du nettoyage est entièrement testée et approuvée selon la norme ISO 15883 partie 5, annexes F, N, R, et selon la Directive relative à la validation des processus de nettoyage et de désinfection automatisés pour le traitement d'endoscopes flexibles des organismes DGLH, DEGEA, DGSV et AKI (2011).

EXCELLENTE PERFORMANCES DE PROCESSUS

Les résultats de ces tests approfondis fournissent la preuve de l'efficacité du processus de nettoyage et de désinfection dans un laveur désinfecteur WASENBURG® en combinaison avec des produits chimiques de processus EndoHigh®. Si la sécurité du patient est essentielle, optez pour des produits chimiques de processus EndoHigh® pour un processus automatisé optimal et 100 % sûr.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les combinaisons de produits EndoHigh® ont été développées exclusivement pour le nettoyage et la désinfection d'endoscopes traités dans les laveurs désinfecteurs d'endoscopes WASENBURG® WD4200, WD415, WD440 et WD440 PT (Traversant).

ENDOHIGH® PAA

Principe actif	Acide peracétique 11,5 %
Allégation d'efficacité	5 minutes à 35 °C
Dilution requise	S'effectue automatiquement dans le laveur désinfecteur WASENBURG®. EndoHigh® PAA est un produit à usage unique et aucun activateur n'est nécessaire.
Concentration de dosage	1,3 %

ENDOHIGH® DETERGENT

Principe actif	Mélange optimisé de détergents et de solubilisants
Allégation d'efficacité	4 minutes à 35 °C
Dilution requise	S'effectue automatiquement dans le laveur désinfecteur WASENBURG®.
Concentration de dosage	0,5 %

Il est préférable d'utiliser EndoHigh® Detergent pour le pré-nettoyage manuel.

Coordonnées

Wassenburg France SAS
ZAC des Playes Nord
71, Allée d'Helsinki
83500 La Seyne Sur Mer
FRANCE

T: + 33 (0) 49 406 1808
info@wassenburgmedical.fr
www.wassenburgmedical.fr



Wassenburg Medical, membre de la Hoya Corporation, est une entreprise leader à travers le monde, spécialisée dans le développement et la fabrication de produits et de services innovants visant à optimiser le cycle de traitement des endoscopes. Nous élargissons sans cesse nos activités et notre gamme de produits et disposons d'un réseau de distribution international très expérimenté. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site Web.

© Copyright 2022. Sous réserve de modifications.