

Spécialistes dans le traitement d'endoscopes depuis plus de 35 ans !




ENDOCART

Solution de transport pour tous les types
d'endoscopes flexibles

wasSENBURG
medical

UN ENDOSCOPE SÛR POUR CHAQUE PATIENT

Wassenburg Medical est un leader dans le retraitement des endoscopes. Depuis plus de 35 ans, nous développons des solutions innovantes avec pour seul objectif de fournir un endoscope sûr à chaque patient. Le résultat est une gamme de produits et de solutions qui couvrent le spectre complet du retraitement des endoscopes: une solution intégrale.

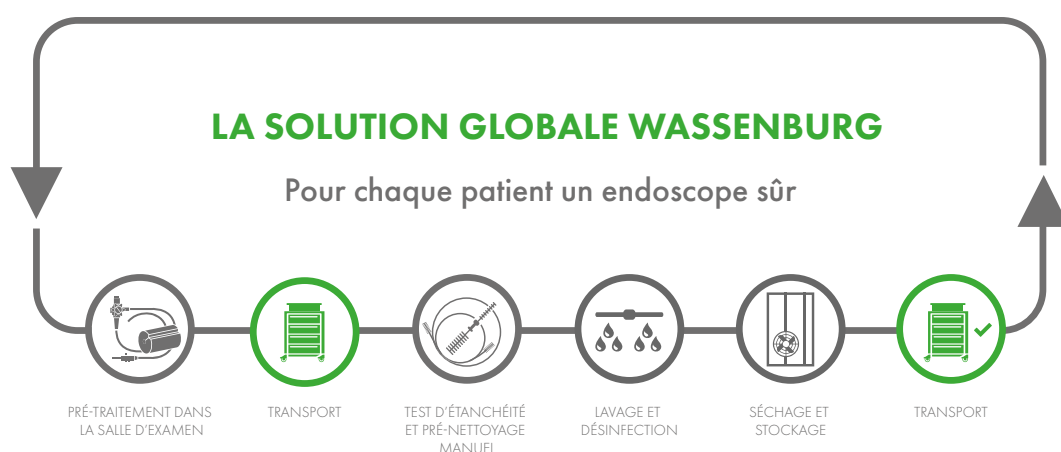

AVANTAGES DE L'ENDOCART

- Protection des équipements couteux pendant le transport
- Réduction du risque de contamination croisée
- Protection du personnel médical contre les risques microbiologiques
- Amélioration du flux de travail lors des opérations quotidiennes
- Utilisation facile, identification du statut en un clin d'œil
- Facile à nettoyer, maintenance aisée



- La surface lisse du bac facilite le nettoyage et la désinfection
- Le dessus du chariot fournit un espace de travail supplémentaire dans les zones plus étroites (p. ex. au chevet du patient)
- Le bac est dépourvu de toute zone non accessible pour un nettoyage et une désinfection optimaux
- La taille du bac permet d'éviter tout enroulement de l'endoscope
- Les bacs et la partie supérieure sont résistants à la chaleur jusqu'à 93 °C, ce qui entraîne un niveau de traitement A0 600 selon ISO 15883 partie 1



- Partie supérieure amovible pour un nettoyage et une désinfection aisés
- 6 bacs pour le transport de plusieurs endoscopes désinfectés vers le patient suivant
- Châssis en acier inoxydable
- Poignée ergonomique garantissant une prise en main ferme lors de l'utilisation du chariot
- Une gamme de deux housses (stérile/non stérile) conçues pour l'Endocart protègent l'endoscope pendant son transport
- Facile à manœuvrer grâce à ses quatre roulettes pivotantes
- Équipé de freins pour améliorer la stabilité



CARACTÉRISTIQUES ENDOCART

Le Wassenburg EndoCart est conçu pour protéger les endoscopes flexibles des contaminants présents dans l'air et de tout dégât survenant lors du transport entre la salle d'examen et la salle de traitement. La conception robuste mais élégante de l'EndoCart combinée aux quatre roulettes pivotantes permettent de manœuvrer aisément dans les zones exigües.

Dimensions du chariot	510 x 690 x 1050 mm
Capacité	de 6 bacs
Poids (vide)	23 kg
Poids (avec bacs)	31 kg

CARACTÉRISTIQUES HOUSSES WASSENBURG ET BAC

Le kit de housses stériles est constitué de deux housses stériles exemptes de latex : une housse de base à placer dans le bac EndoCart, sur lequel est posée l'endoscope désinfecté lors du transport, et une housse dotée d'une identification visuelle à code couleur transparent pour couvrir le bac afin d'offrir un environnement protecteur, tant aux patients qu'au personnel médical. La taille du bac permet d'éviter tout entortillement des endoscopes et tout choc physique pour ceux-ci. Le bac ne présente aucun rebord susceptible d'empêcher un nettoyage efficace.

Dimensions du bac	430 x 550 x 100 mm
Capacité	1 endoscope
Poids (vide)	1.3 kg
Housses Wassenburg pour bac EndoCart	200 pièces (4 X 50 par carton)
Housses Wassenburg pour bac EndoCart – non stérile	300 pièces (par carton)

Wassenburg France SAS

ZAC des Playes Nord

71, Allée d'Helsinki

83500 La Seyne Sur Mer

FRANCE

T : + 33 (0) 49 406 1808

info@wassenburgmedical.fr

www.wassenburgmedical.fr